



- 【同封中身】
- ①スポイト
  - ②スピッツ管(滅菌処理済)
  - ③テープ
  - ④チャック袋
  - ⑤エアバック(高分子ポリマー同梱)
  - ⑥アルミパウチ袋
  - ⑦クッション封筒
  - ⑧個人情報

【出荷までの手順】

**1:**取れたおしっこをスポイト(①)で吸取りスピッツ管(②)に入れます。  
\*スピッツ管に表示された赤線目印まで入れてください。



**2:**スピッツ管の蓋をしっかりと閉めて、蓋と本体の間をテープ(③)で巻き付けます。  
\*テープは引っ張りながら巻き付けてください。テープは伸縮性です。



**3:**チャック袋(④)に本管を同封してしっかりと封をして下さい。

\*チャック袋に同封されている袋と共にスピッツ管を入れて下さい。  
\*なるべく袋の中の空気を抜いて閉めて下さい。



**4:**エアバック(⑤)にチャック袋(④)を入れてテープで封をして下さい。

\*エアバックに両面テープが貼ってありますので、しっかりと貼り付けて下さい。  
\*袋の中身は、高分子ポリマー等が入っています。(尿が漏れた場合高分子ポリマーにて尿を吸着し外部への漏れを防ぐため)  
\*なるべく袋の中の空気を抜いて閉めて下さい。



**5:**アルミパウチ袋(⑥)にエアバック(⑤)を入れて袋の口をしっかりと封をして下さい。

\*なるべく袋の中の空気を抜いて閉めて下さい。



**6:**クッション封筒(⑦)にアルミパウチ袋(⑥)を入れて口を閉じて下さい。


\*個人情報用紙も同封してください。

\*ゆうパケットにご依頼主の住所・お名前をご記入の上、お問い合わせ番号をはがしてポストに投函して下さい。



**7:**最寄りのポストに投函して下さい。

\*尿はできるだけ朝一番で採取して下さい。  
\*ポストへの投函は、遅くとも採取した当日の午前中におこなって下さい。  
\*指定検査センターの営業日を必ずご確認の上、投函して下さい。(日・祝・年末年始等は受付できません。 平日月曜日～木曜日の投函をお願い致します。)

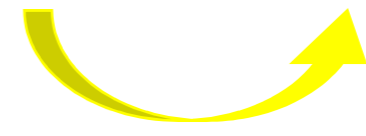

**8:**検査結果はご指定されたアドレスにメールにて報告させていただきます。

名古屋市獣医師協同組合

